

Frederiksberg Vægtfabrik

v/Mogens Küppers . Sankt Knudsvej 18 . 1903 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 02 10 . Biltlf. 40 45 37 10 . Privattlf. 56 14 67 10 . Giro 5 29 03 76
Telefax 33 24 02 71



Brugsvejledning til Tanita Fedtanalysevægt SC 330 S-P

- 1. Tænd = Gul knap**
- 2. Blinker ud for Clothes weight, tast ind for tøj
1- 2 kg. tryk enter**
- 3. STEP ON blinker = træd op på vægten.**
- 4. ID blinker = tast ID nr. ind tryk enter.**
- 5. Body Type blinker = tast standard eller athletic
(Ved Athletic, skal man træne ekstremt meget)**
- 6. Male)Femme blinker = tast mand/kvinde**
- 7. Age blinker = tast alder**
- 8. Height blinker = tast højde**
- 9. Stå stille og afvent udskrift**

Frederiksberg Vægtfabrik

v/Mogens Küppers . Sankt Knudsvej 18 . 1903 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 02 10 . Biltlf. 40 45 37 10 . Privattlf. 56 14 67 10 . Giro 5 29 03 76
Telefax 33 24 02 71



Reparation af
Chronos
og Libra vægte

Vejning kun med vægt.

Tryk weight only grøn lampe lyser ud for Body weight.

- 10. blinker ved clothes = tast ind for tøj eller tast 0,0.**
- 11. ID blinker = tast ID tryk enter**
- 12. STEP ON blinker= trød op på vægten afvent Print.**

Tilbage til kropsanalyse tryk BODY COMPOSITION grøn lampe lyser ud for Body Composition.